

	MODE OPÉRATOIRE  <b>ENTRETIEN DES ECHOGRAPHES</b>	<b>MO INF 002 v2</b>	
		02/13	1/2

### MODIFICATIONS APORTEES

- Actualisation selon la réglementation
- Traçabilité

### OBJET

Maintenir la qualité du matériel par l'entretien des différents éléments constituant les échographes.

### DOMAINE D'APPLICATION

Tous les services possédant un échographe.

### PERSONNEL CONCERNE

Médecins, Sage-femmes, manipulateurs, IDE, AS/AP.

### REFERENCES

#### Références législatives, réglementaires et normatives

Guide de bonnes pratiques de désinfection des dispositifs médicaux (CTIN 1998)

Décret N°2007-1188 du 3 août 2007, relatif au statut des Aides-soignants et des Agents de Services Hospitaliers

Gaines de protection à usage unique pour dispositifs médicaux réutilisables, recommandations d'utilisation, HCSP, CTINILS, 14 décembre 2007

Avis relatif à la désinfection des sondes à échographie endocavitaire, HCSP, octobre 2008

Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier, activité 7 : Contrôle et gestion de matériels, dispositifs médicaux et produits

#### Références internes

MO SPI - PRE 036 relatif à l'hygiène des mains

PG ENS - ENT 004 relative à l'élimination des déchets

### LISTE DES ANNEXES

NA

### MOTS CLES

Entretien, échographe.

### DEFINITIONS ET ABREVIATIONS

NA

### INDICATEURS

NA

Rédaction (nom et fonction)	Visa	Vérification (nom et fonction)	Visa	Approbation support (nom et fonction)	Visa
M. DUHAMEL – CS – UHLIN V. LEFEBVRE – IDE – UHLIN		Dr BOUREZ – Président du CLIN Dr ALFANDARI – PH – UHLIN		E. VERWAERDE – Ingénieur qualité – Bureau Qualité	

